

ANLEITUNG GURGELTEST



1. Account erstellen

Erstellen Sie Ihren persönlichen Account und fügen Sie – falls gewünscht – auch Familienmitglieder oder Freunde hinzu. Bitte bringen Sie zur Abholung der Tests Ihr Smartphone mit.

Die Accounts können auch verknüpft werden. Weitere Informationen dazu finden Sie in den Accounteinstellungen.



Anmeldung

QR-Code scannen
oder unter:
my.novatium.at



2. Test abholen & bestätigen

In der Partner-Filiale weisen Sie dem Personal Ihre Abhol-Bestätigung am Smartphone vor. Bestätigen Sie Ihre Abholung.

Test-Kits dürfen nur bei Anzeige der Bestätigung ausgegeben werden.

Partner-Filialen:



3. Gurgeln & scannen

Führen Sie die folgenden 6 Schritte aus:



1 30 Minuten vor Probenabgabe, Mund mit Wasser ausspülen. Im Anschluss nichts essen oder trinken.



2 Füllen Sie das Röhrchen bis zur Hälfte mit Wasser und gurgeln Sie mit diesem Wasser für 30 Sekunden.



3 Den beiliegenden Trichter auf das Röhrchen schrauben.



4 Spucken Sie die gesamte Flüssigkeit zurück in das Röhrchen. Den Trichter entsorgen und Probe gut verschließen.



5 Kleben Sie den beigelegten QR-Code auf die Seite des Röhrchens & scannen Sie diesen mit „Test einlösen“ in Ihrem Novatium-Account ein.



6 Geben Sie nun das Röhrchen in den Rückgabebeutel und verschließen Sie diesen sorgfältig.



4. Gurgeltest abgeben

Geben Sie Ihren Test zur Auswertung bei einer Rückgabestation in einer Partner-Filiale ab.

Die Testungen werden im Laufe des Tages in das Labor geliefert und dort ausgewertet.



5. PCR-Testergebnis erhalten

Die Laborergebnisse werden Ihnen nach erfolgreicher Durchführung per E-Mail übermittelt.

Sie können diese natürlich auch jederzeit in Ihrem Account einsehen.

Damit Ihre Daten geschützt bleiben, übermitteln wir Ihnen ausschließlich den Link zum Testzertifikat (Grüner Pass) sowie Vor- und Nachname der getesteten Person.



Weitere Informationen unter:
www.kitzbueheler-alpen.com/corona

Kitzbüheler Alpen
Telefon: +43 57507
info@kitzalps.com | www.kitzbueheler-alpen.com